

アイチェック PCR検査の流れ

NEW 抗原検査キットにて陽性反応が出た方でご希望される場合は、PCR検査サービスを無償で提供いたします。

提供先:医療法人社団青い鳥会

新型コロナウイルス

PCR検査

自宅できる | 唾液で検査

結果通知

最短3時間~24時間

確定診断



アイチェック ICheck


陰性証明書 の発行も可能です。
発行先:医療法人社団青い鳥会 (別途費用4400円)

申込手順 (取扱い説明書のQRコードより申込みできます)

- ① 検査後20分以内に、検査結果登録をお願いします。
※検査から長時間経過された場合、正しい結果とならない可能性があるため無効となります。
- ② 提携医療機関までご連絡ください。
(医療法人社団青い鳥会03-5860-9053)
- ③ オペレーターが検査結果登録システムで陽性を確認した後、PCR検査キットをご自宅にお送りします。
唾液を採取し返送してください。
メールにて検査完了のお知らせが届き、ICheckカルテで結果報告をご確認いただけます。

検査手順

- ① 唾液採取容器に唾液を採取してください。
- ② 容器を梱包し同梱している返送BOXに入れ
- ③ 同梱のゆうパック伝票を貼り付け、ゆうパック取扱可能な郵便局窓口または集荷サービスにて返送ください。

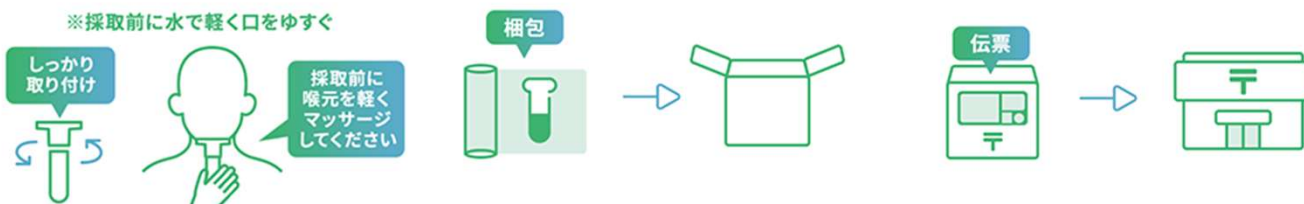

PCR検査結果が陽性だった場合

提携医療機関(医療法人社団青い鳥会)よりお客様へご連絡をいたします。その後、保健所へ報告をします。保健所より連絡があり次第、指示に従った行動をお願いいたします。保健所から連絡が来るまでは自宅にて待機をお願いいたします。

Icheck抗原検査キット販売数

累計400,000個突破!

医療関係者が選ぶNo.1

顧客満足度No.1

(※調査企画：日本経済リサーチ機構(株)調べ)

お問い合わせ・ご注文

ご注文の際は、①個数 ②お届け先 ③ご連絡先 をお申し付け下さい。

JAM T&S
トラベル&サポート

納期：注文から5日以内 お支払い：納品後請求書を送付
☎ 03-3457-9932

FAX 03-3457-9935 <平日9:30~17:30>
mail takada@jamt-s.co.jp(担当：高田)

JAMトラベル&サポート株式会社 〒105-0014

東京都港区芝2-20-12 友愛会館16階